


Emitido por: Logowords Publicidade Lda.


Data: 11-04-2020


## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO


<b>Nome do produto:</b>	Viseira	<b>Código do produto:</b>	ELFMSP01
<b>Componentes do produto</b>		<b>Códigos</b>	<b>Imagem/Esquema</b>
Suporte de viseira		SP00	
Proteção da face		FM01	
Fita ajustável		EL00	
<b>Descrição do produto:</b>	<p>O produto Viseira ELFMSP00 acopla 3 componentes: 1 suporte de viseira, 1 proteção da face e 1 fita ajustável. Estes obtidos por processos distintos, embalados em conjunto e montados no recetor. O produto ajuda a proteger o rosto contra projeção de salpicos e gotículas líquidas.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:</b>  Viseira de proteção contra a projeção de salpicos e gotículas líquidas em APET  Boas condições de visibilidade;  Suporte de proteção da face em PP;  Bom comportamento à transpiração;  Fita ajustável em PVC flexível;  - Resistente ao impacto;  - Facilidade de montagem.</p> <p>O produto surge para colmatar a lacuna de equipamento de proteção individual despoletado pelo surto Covid-19. Não confere proteção respiratória nem contra agentes biológicos.</p> <p>Foram considerados os requisitos do regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 2016, as normas harmonizadas EN166:2001 (6.1;6.2;6.3;7.1.1;9 e 10) e EN 168:2001 (12;18) As informações contidas neste documento baseiam-se no estado atual dos nossos conhecimentos e respeitam a legislação nacional e comunitária relativa a esta matéria.</p>		

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

<b>Tolerância da tara:</b>	2%	<b>Dimensões máximas do conjunto (opcional):</b>	195 x 234 x 280 mm
----------------------------	----	--	--------------------

<b>COMPONENTE:</b>	SP00 _ Suporte de viseira			
<b>Dimensões máximas (ANEXO 1)</b>	194 x 147 x 20 mm	<b>Espessura média:</b>	2,5 mm	<b>Tolerância de espessura:</b> +/- 0,5 mm
<b>Materiais: (ANEXO 4)</b>	PP Copolimero - Repol B030MG	<b>Contração:</b>	1,50%	<b>Volume:</b> 36,56 cm <sup>3</sup>
<b>Acabamentos:</b>	SPI/SPE B2		<b>Cores:</b>	Preto (BK) Branco (WT) Verde (GN) Laranja (OR) Baby blue (BB) Azul (BL) Roxo (PR)

<b>COMPONENTE:</b>	<b>FM01 _ Proteção da face</b>					
<b>Dimensões máximas (ANEXO 2)</b>	280	x	254	x	1 mm	<b>Espessura média:</b> 0,6 mm <b>Tolerância de espessura:</b> +/- 0,2 mm
<b>Materiais: (ANEXO 5)</b>	APET		<b>Contração:</b>		<b>Volume:</b> 41,92 mm <sup>3</sup>	
<b>Acabamentos:</b>					<b>Cores:</b> Translúcido	

<b>COMPONENTE:</b>	<b>EL00 _ Fita ajustável</b>					
<b>Dimensões máximas (ANEXO 3)</b>	330	x	18	x	2 mm	<b>Espessura média:</b> 0,9 mm <b>Tolerância de espessura:</b> +/- 0,2 mm
<b>Materiais: (ANEXO 6)</b>	PVC Flexível - transparente		<b>Contração:</b>	n/a	<b>Volume:</b> 5,56 cm <sup>3</sup>	
<b>Acabamentos:</b>	n/a				<b>Cores:</b> Transparente	

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Processo de produção:</b>	<p><b>SP00 - Suporte de viseira:</b> Obtido através do processo de injeção de termoplástico.</p> <p><b>FM00 - Proteção da face:</b> Obtida através de extrusão e posteriormente submetida a corte.</p> <p><b>EL00 - Fita ajustável:</b> Obtida através do processo de extrusão e posteriormente cortada e furada por punção.</p>
<b>Embalamento e montagem:</b>	<p>Embalamento em sacos plásticos selados a cartão agrafado . Cada embalagem contem: 1 suporte de viseira, 1 proteção da face, 1 fita ajustável e as instruções de montagem.</p> <p>As embalagem para transporte deverão ser inseridas em caixas de cartão mediante as quantidades solicitadas.</p>
<b>Uso pretendido:</b>	Utilizar como complemento da máscara para reduzir o risco de infeções transferidas pelo ar e protege contra os efeitos de partículas.
<b>Método de montagem:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abra a embalagem com cuidado para não danificar o produto e retire os componentes.</li> <li>2. Comece por inserir a proteção no suporte por um dos lados até completar o último pino.</li> <li>3. Para maior facilidade de encaixe do último pino pressione a aba do suporte para fora e encaixe completamente a viseira.</li> <li>4. Num dos lados, introduza a fita elástica no suporte da viseira</li> <li>5. Encaixe no outro lado, a outra ponta da fita elástica</li> <li>6. Coloque o suporte na cabeça com a viseira transparente virada para a frente e ajuste o elástico à sua medida.</li> </ol>
<b>Manutenção:</b>	<p>Deve ser limpo com soluções a base de água ou através de produtos de limpeza específicos para viserias.</p> <p>Pode também ser desinfectado com álcool isopropílico.</p>
<b>Requisitos de controlo:</b>	<p>Isento de manchas de óleo ou outros contaminantes;</p> <p>Isento de queimados ou zonas de material degradado;</p> <p>Isento de rebarba;</p> <p>Garantir a funcionalidade do produto (peça devidamente cheia).</p>

## ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

<b>Função declarada:</b>	Proteção contra a projeção de salpicos e gotículas líquidas.
<b>Destinatários do produto:</b>	Hospitais, Centros de saúde, Bombeiros, Forças de Segurança, Lares e Público em geral.
<b>Funcionamento:</b>	A montagem do produto é feita no utilizador, sendo o mesmo acompanhado das instruções de montagem.
<b>Ergonomia:</b>	O produto permite a adaptação a vários tamanhos devido à fita regulável.
<b>O objeto estará exposto a:</b>	Meio aéreo. Não está exposto a ambientes corrosivos.
<b>Requisitos de funcionamento:</b>	Garantir a fixação da viseira de proteção.
<b>Frequência de carga:</b>	Não são aplicadas cargas no uso.

FOTOS  
Embalagem

