

Emitido por: Logowords Publicidade Lda.

Data: 11-04-2020

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do produto:	Viseira infantil	Código do produto:	ELFMSP02
Componentes do produto		Códigos	Imagem/Esquema 
Suporte de viseira		SP00	
Proteção da face		FM02	
Fita ajustável		EL00	
Descrição do produto:	<p>O produto Viseira ELFMSP00 acopla 3 componentes: 1 suporte de viseira, 1 proteção da face e 1 fita ajustável. Estes obtidos por processos distintos, embalados em conjunto e montados no recetor. O produto ajuda a proteger o rosto contra projeção de salpicos e gotículas líquidas.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO: Viseira de proteção contra a projeção de salpicos e gotículas líquidas em APET; Boas condições de visibilidade; Suporte de proteção da face em PP; Bom comportamento à transpiração; Fita ajustável em PVC flexível; - Resistente ao impacto; - Facilidade de montagem.</p> <p>O produto surge para colmatar a lacuna de equipamento de proteção individual despoletado pelo surto Covid-19. Não confere proteção respiratória nem contra agentes biológicos.</p> <p>Foram considerados os requisitos do regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 2016, as normas harmonizadas EN166:2001 (6.1;6.2;6.3;7.1.1;9 e 10) e EN 168:2001 (12;18) As informações contidas neste documento baseiam-se no estado atual dos nossos conhecimentos e respeitam a legislação nacional e comunitária relativa a esta matéria.</p>		

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tolerância da tara:	2%	Dimensões máximas do conjunto (opcional):	195 x 234 x 280 mm
----------------------------	----	--	--------------------

COMPONENTE:	SP00 _ Suporte de viseira			
Dimensões máximas (ANEXO 1)	194 x 147 x 20 mm	Espessura média:	2,5 mm	Tolerância de espessura: +/- 0,5 mm
Materiais: (ANEXO 4)	PP Copolimero - Repol B030MG	Contração:	1,50%	Volume: 36,56 cm ³
Acabamentos:	SPI/SPE B2	Cores:	Preto (BK) Branco (WT) Verde (GN) Laranja (OR) Baby blue (BB) Azul (BL) Roxo (PR)	

COMPONENTE:	FM02 _ Proteção da face					
Dimensões máximas (ANEXO 2)	280	x	245	x	1 mm	Espessura média: 0,6 mm Tolerância de espessura: +/- 0,2 mm
Materiais: (ANEXO 5)	APET		Contração:		Volume: 41,92 mm ³	
Acabamentos:					Cores: Translúcido	

COMPONENTE:	EL00 _ Fita ajustável					
Dimensões máximas (ANEXO 3)	330	x	18	x	2 mm	Espessura média: 0,9 mm Tolerância de espessura: +/- 0,2 mm
Materiais: (ANEXO 6)	PVC Flexível - transparente		Contração:	n/a	Volume: 5,56 cm ³	
Acabamentos:	n/a				Cores: Transparente	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processo de produção:	<p>SP00 - Suporte de viseira: Obtido através do processo de injeção de termoplástico.</p> <p>FM02 - Proteção da face: Obtida através de extrusão e posteriormente submetida a corte e devidamente presonalizado.</p> <p>EL00 - Fita ajustável: Obtida através do processo de extrusão e posteriormente cortada e furada por punção.</p>
Embalamento e montagem:	<p>Embalamento em sacos plásticos selados a cartão agrafado. Cada embalagem contem: 1 suporte de viseira, 1 proteção da face, 1 fita ajustável e as instruções de montagem.</p> <p>As embalagem para transporte deverão ser inseridas em caixas de cartão mediante as quantidades solicitadas.</p>
Uso pretendido:	Utilizar como complemento da máscara para reduzir o risco de infeções transferidas pelo ar e protege contra os efeitos de partículas.
Método de montagem:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra a embalagem com cuidado para não danificar o produto e retire os componentes. 2. Comece por inserir a proteção no suporte por um dos lados até completar o último pino. 3. Para maior facilidade de encaixe do último pino pressione a aba do suporte para fora e encaixe completamente a viseira. 4. Num dos lados, introduza a fita elástica no suporte da viseira 5. Encaixe no outro lado, a outra ponta da fita elástica 6. Coloque o suporte na cabeça com a viseira transparente virada para a frente e ajuste o elástico à sua medida.
Manutenção:	<p>Não tem manutenção. Deve ser descartado.</p> <p>O fabricante não se responsabiliza pela viseira sempre que esta seja utilizada fora dos padrões de uso pretendido e sem ser de acordo com as instruções de utilização.</p>
Requisitos de controlo:	<p>Isento de manchas de óleo ou outros contaminantes;</p> <p>Isento de queimados ou zonas de material degradado;</p> <p>Isento de rebarba;</p> <p>Garantir a funcionalidade do produto (peça devidamente cheia).</p>

ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

Função declarada:	Proteção contra a projeção de salpicos e gotículas líquidas.
Destinatários do produto:	Hospitais, Centros de saúde, Bombeiros, Forças de Segurança, Lares e Público em geral.
Funcionamento:	A montagem do produto é feita no utilizador, sendo o mesmo acompanhado das instruções de montagem.
Ergonomia:	O produto permite a adaptação a vários tamanhos devido à fita regulável.
O objeto estará exposto a:	Meio aéreo. Não está exposto a ambientes corrosivos.
Requisitos de funcionamento:	Garantir a fixação da viseira de proteção.
Frequência de carga:	Não são aplicadas cargas no uso.

FOTOS
Embalagem

